

Lingettes désinfectantes

> Lingettes pré-imprégnées à base d'alcool pour la désinfection rapide de surfaces délicates et de matériel informatique (CLAVIERS, SMARTPHONES, TABLETTES, ECRANS TACTILES)



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

BACTÉRICIDE / VIRUCIDE / TUBERCULOCIDE / LEVURICIDE / MYCOBACTÉRICIDE

- Ne laisse pas de traces
- Ne peluche pas
- Particulièrement respectueux des matériaux fragiles
- Faible humidification



DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sont des lingettes pré-imprégnées prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide et douce des surfaces résistantes à l'alcool de tout type, notamment des surfaces délicates.

Les lingettes DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sont particulièrement adaptées au nettoyage et à la désinfection des écrans et des panneaux de commande ou claviers sensibles. L'association optimale de la lingette et du liquide d'imprégnation permet une désinfection douce et efficace.

LES LINGETTES

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sont prêtes à l'emploi et peuvent être prélevées séparément de l'emballage refermable particulièrement pratique.

Spectre d'action et méthode de contrôle			30 sec.	1 min.	2 min.	3 min.
Bactéries et champignons						
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surface (bactéricide, levuricide)*	VAH**	avec action mécanique conditions de saleté		•		
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surface (bactéricide, levuricide)*	EN 16615	avec action mécanique conditions de saleté			•	
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	conditions de propreté	•			
mycobactéricide (M. avium)	EN 14348	conditions de propreté		•		
Virus						
efficace contre tous les virus enveloppés (virucide limité)	RKI/DVV	incl HBV/HIV/HCV	•			
efficace contre les rotavirus	EN 14476	conditions de propreté	•			
efficace contre les norovirus (NVM)	EN 14476	conditions de propreté		•		
efficace contre les adenovirus	EN 14476	conditions de propreté				•
Des résultats de tests EN supplémentaires						
bactéricide	EN 13727	conditions de propreté conditions de saleté		•		
levuricide	EN 13624	conditions de propreté conditions de saleté		•		

* y compris des essais de phase 2 niveau 1 et phase 2 niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais porte-germes)

** répertorié dans la colonne 5 min de la liste VAH

Fabriqué par



Dr. Schumacher

www.schumacher-online.com

Importé en France par

THX MEDICAL SARL

125, Impasse du belvédère - 69280 Marcy l'étoile - FRANCE

Std: 00 33 04 78 87 17 99 - Fax: 00 33 4 78 87 16 98 - info@thxmedical.com

DESCOCEPT[®] SENSITIVE WIPES

Lingettes imbibées à base d'alcool pour la désinfection rapide des surfaces délicates.



DOMAINES D'APPLICATION

Selon la loi sur les dispositifs médicaux (LDM) :
Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool. Particulièrement adaptées aux écrans, claviers et panneaux de commande des appareils médicaux sensibles.

Selon le règlement sur les produits biocides (RPB) :
Désinfection rapide et nettoyage de tout type de surfaces et de matériels médicaux.

SPECTRE D'ACTION

- bactéricide (incl. SARM)
- levuricide (C. albicans)
- tuberculocide
- mycobactéricide
- virucide limité (inclu les virus VHB/VIH/VHC/de la vaccine/VDVB/de l'influenza/de la grippe) efficace contre les rotavirus et norovirus (NVM)

APPLICATION

Désinfection des surfaces

Essuyer les surfaces avec Descosept Sensitive Wipes. Veiller à couvrir entièrement la surface à nettoyer et respecter le délai d'action.

UTILISATION

Jusqu'à 3 mois après ouverture

COMPOSITION

- 100 g de solution contiennent :
- w45,0 g d'éthanol

CONSIGNES PARTICULIÈRES

Matière solide inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des ondes, des flammes et autres sources d'ignition potentielles. Ne pas fumer. Bien refermer le contenant. Ne pas inhaler la vapeur.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. En cas de port de lentilles de contact, les enlever si possible. Continuer à rincer.

LISTES/STATUT DU PRODUIT

Les lingettes Descosept Sensitive Wipes figurent dans la liste actuelle des désinfectants de la VAH et de l'ÖGHMP et sont répertoriées dans la liste IHO des virucides.

Les lingettes DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sont conformes à la réglementation européenne sur les produits biocides (BPR, 528/2012) et à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Les produits de Dr. Schumacher GmbH sont fabriqués suivant des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement. Le respect de critères de qualité élevés permet de garantir une très bonne qualité de produit constante.

ATTESTATIONS

PD Dr. M. Suchomel, hygiéniste, Vienne

Attestation relative à la désinfection de surfaces conforme aux directives VAH.

Prof. Dr. H.-P. Werner, hygiéniste, Bischofs-hofen & Schwerin

Attestation relative à

- la désinfection de surfaces selon les directives VAH
- efficacité contre les rotavirus et les norovirus conformément à la norme EN 14476
- efficacité tuberculocide et mycobactéricide selon EN 14348

Dr. Steinmann, virologue, Brême

Attestation d'efficacité contre

- virus de la vaccine conformément à la directive RKI/DVV
- VDVB (VHC) conformément à la directive RKI/DVV

*VAH équivalent allemand de SF2H

*IHO équivalent allemand de AFSSA

Produit	Conditionnement	Unité	Contenu	Dimensions	Réf.	
	DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Sachet souple	12	80 lingettes	env. 20 × 22 cm	00-323DS-T080-01
	DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Sachet souple	18	10 lingettes	env. 20 x 22 cm	00-323-DS-T010
	SUPPORT MURAL INOX pour 00-323DS-T080-01	Boîte	1	NA	env.105x120 mm	1421265



Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire les notices et informations produit avant usage.

Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH. www.schumacher-online.com

